

유전자 검사 절차 안내

소중한 반려동물 유전 질병 검사, 어렵게 않습니다.

※ 준비물 : 깨끗한 면봉 3개, 깨끗한 지퍼백, 의뢰서

1. 깨끗한 면봉으로 반려동물의 잇몸과 볼 사이를 20회 문지른 후, 지퍼백에 넣습니다.
2. 손으로 잡았던 면봉은 잘라서 버리고, 채취한 부분의 면봉만을 지퍼백에 담아서 신청서와 함께 발송합니다.

■ 의뢰서 작성 안내

1. 의뢰인, 반려동물 정보를 기재합니다. (병원정보는 병원에서 의뢰서 작성해주세요.)
2. 반려동물의 해당 검사항목을 √ 표시합니다.
3. 2마리 이상의 경우 신청서를 각각 기재합니다.
4. [기타사항] 의뢰항목에없는 검사의 경우 [기타사항]에 기재합니다.

■ 검사물 발송/검사접수

채취된 검체와 신청서류를 동봉하여 아래의 주소로 발송합니다. 검사물이 도착 하면 내용물을 확인 후, 검사 접수 및 검사비 안내를 위하여 의뢰서에 기재된 연락처로 전화드립니다.

보내실 주소: 서울특별시 강서구 양천로 551-17 한화비즈메트로 1차 714호

■ 검사비 결제

국민 459201-04-025428 우리 1005-501-620502 신한 100-025-937180 농협 351-0154-9292-43

※ 기타문의의 사항이나 상담은 “고객지원부 국번없이 1577-6505” 에서 자세히 안내해 드립니다.

신청서 작성



구강상피세포 채취



검체 접수



검사 진행



결과 확인

